

PAINEL RÉGUA HAOXI PARA AMBULÂNCIA



Esta Instrução de Uso apresenta as informações necessárias para a correta utilização do Painel Régua Haoxi para Ambulância.

FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

FABRICADO POR:

Rioxi Ind. Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares EIRELI

Rua Anhembí, 80 – Jardim Caravelas – São Paulo/SP – CEP: 04728-010

CNPJ: 41.621.496/0001-06 – I.E.: 131.018.686.111 – AFE ANVISA nº: 8.23.535-9

Fone: +55 (11) 5642-1666 / 5642-0091 / 5642-0004 / 5642-2556

DISTRIBUIDO POR:

Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA

Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – São Paulo/SP – CEP: 04727-040

CNPJ: 05.678.146/0001-04 – IE: 116.613.824.117 – AFE ANVISA nº: 8.01.900-1

Fone: +55 (11) 5642-0587 – www.haoxi.com.br

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA

Nome Técnico: Painel Multifuncional

Nome Comercial: Painel Régua Haoxi para Ambulância

Número de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA: 82353590031

Responsável Técnico: Sibila de Carvalho Arruda – CRF/SP: 106904

DESCRIÇÃO

O Painel Régua Haoxi para Ambulância é indicado para distribuir a rede de gases medicinais em pontos de apoio aos materiais e equipamentos auxiliares em diversos ambientes. As principais áreas de aplicação do Painel Régua Haoxi para Ambulância são: Hospitais, Clínicas, Centros cirúrgicos, Ambulatórios, UTI e Ambulância.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

A rede de gás medicinal é conectada ao Painel Régua Haoxi para Ambulância e através de interligação de tubos do circuito é dividido em pontos podendo ser de 2, 3 ou 4.

APRESENTAÇÃO

O Painel Régua Haoxi para Ambulância está disponível conforme o número de Nipples de entrada e o número de Nipples de saída dos gases medicinais.

Código	Produto
PA4602	PAINEL RÉGUA HAOXI EM AÇO COM 2 ENTRADAS E 3 SAÍDAS PARA OXIGÊNIO, 1 SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO
PA4603	PAINEL RÉGUA HAOXI EM AÇO COM 1 ENTRADA E 3 SAÍDAS PARA OXIGÊNIO (NK)
PA4604	PAINEL RÉGUA HAOXI EM AÇO COM 1 ENTRADA E 3 SAÍDAS PARA AR COMPRIMIDO
PA4631	PAINEL RÉGUA HAOXI EM AÇO COM 1 ENTRADA E 3 SAÍDAS PARA OXIGÊNIO COM RABICHO DE 30 CM
PA4632	PAINEL RÉGUA HAOXI EM AÇO COM 1 ENTRADA E 2 SAÍDAS PARA OXIGÊNIO
PA4633	PAINEL RÉGUA HAOXI EM AÇO COM 1 ENTRADA E 2 SAÍDAS PARA AR COMPRIMIDO

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- O Painel Régua Haoxi para Ambulância deve ser manuseado por pessoal qualificado e operado por pessoal treinado.
- É imprescindível a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUÇÃO antes de utilizar o Painel Régua Haoxi para Ambulância.
- A utilização do produto antes do completo entendimento das suas características e funções, resulta em condições de risco para o paciente e o próprio produto.

- Verifique se as conexões disponíveis estão devidamente identificadas e estão em perfeito estado de conservação.
- Verifique se não há vazamentos nas conexões, utilizando um pincel e solução com água e sabão neutro (espuma).
- Teste as conexões anteriormente a sua utilização a fim de minimizar qualquer mau funcionamento durante o procedimento específico
- Não fume na área onde o produto está instalado e utilizado.
- Nunca use óleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais orgânicos similares em contato com o oxigênio, sob risco de explosão.
- Manter o produto limpo e em bom estado de conservação.
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada nesta instrução de uso.
- Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE e/ou DESINFECTE. A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem prejudicar o profissional e o paciente.
- Não tente fazer qualquer reparo no Painel Régua Haoxi para Ambulância.
- Só utilize o Painel Régua Haoxi para Ambulância em perfeitas condições, qualquer anormalidade contate imediatamente o serviço de Assistência Técnica Rioxi.
- Ao contatar o serviço de Assistência Técnica da Rioxi, tenha em mãos a nota fiscal e o número de lote informado na embalagem do produto.
- A manutenção deste produto só deve ser feita por pessoal técnico treinado, qualificado e autorizado pela Rioxi.
- Caso não siga as precauções descritas, isso pode provocar desconforto ao paciente e ao profissional, e será considerado mau uso do produto.
- Produto NÃO ESTÉRIL, deve desinfetar antes do uso.
- NÃO ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE e/ou TERMODESINFECTORA, pois não suporta as temperaturas deste processo e será danificado.
- A não observância destas precauções será considerada como um mau uso do produto.

INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO E USO

1) Antes de utilizar o Painel Régua Haoxi para Ambulância verifique:

- a) Se estão disponibilizadas as conexões necessárias para os equipamentos e acessórios a serem utilizados durante o procedimento a ser executado;
- b) Quando esta condição não estiver atendendo, providenciar a remoção do paciente para um local que atenda esta necessidade ou se possível substituir os acessórios ou equipamentos necessários de forma que sejam compatíveis com as conexões necessárias;
- c) As conexões devem ser utilizadas com o máximo de cuidado, observando todas as recomendações técnicas envolvidas nos procedimentos médicos específicos e as orientações específicas do fabricante de equipamentos que venham a ser conectados ao painel;
- d) As conexões de gases devem ser firmemente conectadas de forma a não permitir nenhum tipo de vazamento entre o painel e a mangueira de conexão e/ou equipamentos.

2) Procedimento para instalação:

- a) Verifique a parte que deve ser instalada na Ambulância;
- b) Conectar as extensões no Painel Régua Haoxi para Ambulância;
- c) Teste todas as funções a fim de verificar se existe algum tipo de obstruções na canalização para a instalação de gases;
- d) Efetue as ligações de gases na parte correspondente do painel;
- e) Teste todas as funções a fim de verificar se existe algum tipo de obstruções na canalização de gases.

Atenção: Para uma nova utilização limpe adequadamente. Após ter terminado o procedimento, realize a limpeza, desinfecção e/ou esterilização.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO/ESTERILIZAÇÃO

LIMPEZA

Para realizar a limpeza do Painel Régua Haoxi para Ambulância não será necessário desconectá-lo do local onde ele estiver sendo utilizado.

Realize a limpeza utilizando um pano umedecido em solução de água e sabão neutro, passando por toda a superfície do Painel Régua Haoxi para Ambulância e depois utilize um pano seco, limpo e macio para retirar o excesso.

DESINFECÇÃO

A desinfecção não pode ser feita por imersão ou em câmaras fechadas sob temperaturas superiores à temperatura ambiente, pois poderá danificar o produto.

Atenção: Não pode ser utilizado Hipoclorito de Sódio (cloro) ou produtos similares para a limpeza/desinfecção, pois estes produtos danificam o produto.

• Álcool 70%

Para realizar a esterilização utilize álcool 70% na parte externa utilizando pano limpo e umedecido, e faça a secagem com um pano limpo, macio e seco.

• Autoclave e/ou Termodesinfectora

Atenção: O Painel Régua Haoxi para Ambulância NÃO DEVE ser submetido a autoclave e/ou termodesinfectora, pois não suporta as temperaturas deste processo e será danificado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Transportar e Armazenar com cuidado, evitando quedas e choque mecânicos.
- Deve ser transportado com cuidado para garantir a integridade da embalagem.
- Guardar em local seco e fresco e ao abrigo da luz.
- Temperatura ambiente: -5°C até 50°C.
- Umidade Relativa: 10% até 95% não condensável.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para manter bom estado de conservação do produto, deve-se efetuar diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções de limpeza e desinfecção descritas anteriormente neste manual.

Em caso de dano ou vazamento, o Painel Régua Haoxi para Ambulância deve ser descartado e substituído por um novo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO:

- Corpo da Régua: Aço de alta resistência.
- Conexão de entrada (Niple): Latão cromado;
- Conexão de saída (Niple): Latão cromado;
- Tarugo: Latão;
- Tubo para gases: Poliuretano (PU);
- Válvula de Impacto: Pino: Latão / Mola: Aço inoxidável / Anel O'ring: Borracha nitrílica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Conexões conforme norma ABNT NBR 11906.
- Comprimento: varia de acordo com a quantidade de pontos.

DESCARTE DO PRODUTO

O Painel Régua Haoxi para Ambulância NÃO PODE ser descartado em lixo comum ao final de sua vida útil, embora não haja riscos de contaminação enquanto o equipamento estiver em uso normal.

Descarte conforme a RDC nº 222, de 28 de março de 2018 e com os regulamentos ambientais e médicos locais.

TERMO DE GARANTIA

A Rioxi Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares EIRELI, nos limites fixados neste termo de garantia, assegura como fabricante ao consumidor do produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, apresentado no prazo de 1 ano para equipamentos e de 90 dias para acessórios, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da Rioxi em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado, constante falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, por uso em desacordo com a instrução de uso, ou, ainda, no caso de ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas pela Rioxi.

Obriga-se a Rioxi Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares EIRELI, a prestar os serviços, tanto os gratuitos quanto os remunerados, exclusivamente nas localidades para efetuar consertos. O consumidor residente em outra localidade será, pois, o único responsável pelas despesas de transporte, ida e volta do aparelho à assistência técnica mais próxima.

A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do produto, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota contiver rasuras ou modificações em seu teor.

Se o aparelho for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuamente em vigor até a expiração de seu prazo contando da data da aquisição pelo primeiro consumidor.

Os serviços em garantia serão prestados pela Rioxi ou seu representante devidamente autorizado. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante e tenha sempre em mãos o número do lote do produto.