


CÂNULA DE GUEDEL HAOXI

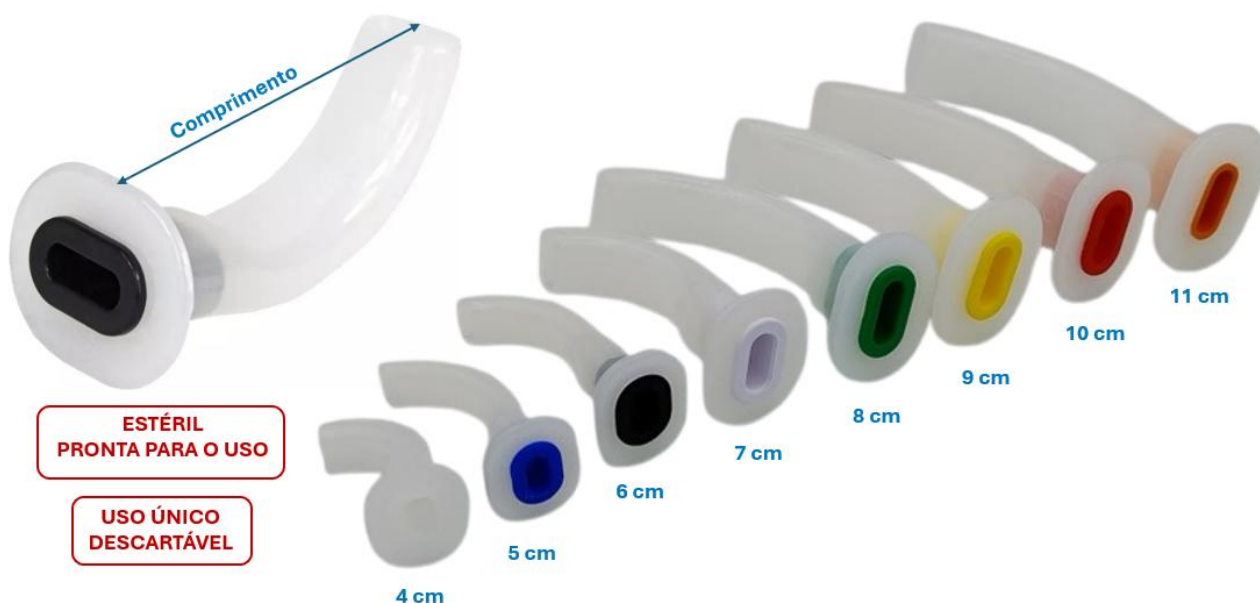

DESCRIÇÃO

Dispositivo médico utilizado para manter as vias aéreas de um paciente abertas quando há risco de obstrução pela língua ou pelos tecidos moles da faringe. É um item essencial em emergências, anestesia e cuidados com pacientes inconscientes ou comatosos.

Além de possuir diversos tamanhos para atender desde pacientes bebês até adultos, é equipada com HB-BLOCK, um canal oculto que permite a passagem de ar e a realização de aspiração de secreções, quando necessário.

São indicados para uso em Clínicas, Hospitais e Ambulâncias.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula de Guedel Haoxi

Número de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA: 82353590035

Responsável Técnico: Sibila de Carvalho Arruda – CRF/SP: 106904

APRESENTAÇÃO

As Cânulas de Guedel Haoxi estão disponíveis em modelos que possam atender todos os tamanhos de pacientes:

CÓDIGO	PRODUTO
CG0800	CÂNULA DE GUEDEL Nº 000 - 40 MM
CG0801	CÂNULA DE GUEDEL Nº 00 - 50 MM
CG0802	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 - 60 MM
CG0803	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 - 70 MM
CG0804	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 - 80 MM
CG0805	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 - 90 MM
CG0806	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 - 100 MM
CG0807	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5 - 110 MM

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS



Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento.

Ao seguir estas instruções, você garante a segurança do paciente, do operador e a durabilidade do equipamento.

Uso exclusivo por profissionais de saúde: O produto deve ser operado exclusivamente por profissionais de saúde devidamente treinados e qualificados.

Instalação correta: contraindicado na utilização em pacientes conscientes ou semiconscientes com reflexo de vômito intacto, pois pode estimular o vômito e causar aspiração. A escolha do tamanho inadequado pode causar obstrução das vias aéreas ou lesões. Um tamanho muito grande pode pressionar a epiglote, enquanto um tamanho muito pequeno pode não manter a língua adequadamente afastada.

Substâncias incompatíveis: A exposição do produto com óleo, graxa, hidrocarbonetos, solventes orgânicos e produtos químicos corrosivos, podem danificar o equipamento, além de causar incêndio ou explosão. Resíduos nas mãos de cremes corporais e/ou margarina/manteiga também podem causar as mesmas consequências, caso esteja sendo utilizado perto do uso de gases medicinais.

Limpeza e desinfecção: Produto de uso único.



Esterilização: Este produto **É ESTÉRIL** e não deverá passar por reprocessamento por ser de uso único.

Não utilize o produto caso este esteja danificado, descarte-o e substitua por um novo.


INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO E USO

Preparação para o Uso

- Antes de cada uso, certifique-se de que o Produto e as mãos do usuário estejam completamente limpos e secos.
- Inspeção visualmente o produto em busca de danos, rachaduras, vazamentos ou obstruções.
- Descarte o produto imediatamente após o uso.

Procedimento de Uso

- Selecionar o tamanho da cânula a ser utilizada, de acordo com o tamanho da mandíbula do paciente. Isto deve ser feito posicionando a ponta da cânula com a curvatura para baixo, medindo o canto lateral da boca até o lóbulo da orelha. A cânula adequada deverá ficar ajustada.
- Posicionar o paciente em decúbito dorsal. Em seguida colocar um apoio sob o pescoço, de maneira que a cabeça fique fletida para trás. Com o auxílio de uma espátula, abaixar a língua do paciente e introduzir a cânula com cuidado por entre os dentes.

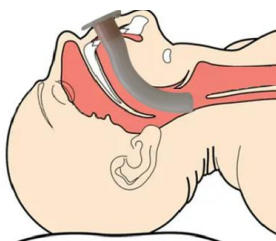

- Se necessário, fixar a cânula utilizando técnica médica atualmente aceita.
- Para retirar, puxar a cânula de maneira suave e descartar em local apropriado.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO/ESTERILIZAÇÃO

Produto **NÃO ESTÉRIL**, porém, pronto para uso.

De **USO ÚNICO**, devendo ser descartado após a utilização.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

A vida útil do produto pode ser afetada por condições de armazenamento e transporte inadequadas, invalidando sua garantia.

Ao seguir estas recomendações, você garantirá a integridade do produto durante o armazenamento e o transporte, assegurando sua qualidade e segurança para o uso.

- Transportar e Armazenar com cuidado, evitando quedas e choque mecânicos, garantindo a integridade da embalagem original.
- Guardar em local limpo, seco e fresco.
- Temperatura ambiente: -5°C até 50°C.
- Umidade Relativa: 10% até 95% não condensável. A umidade excessiva pode causar corrosão, mofo ou deterioração do produto.
- Rotulagem: Mantenha as informações originais do produto intactas e legíveis para facilitar a identificação e o controle do estoque.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Este produto não é passível de corretiva, sendo necessária a substituição imediata caso encontre algum dano.

É de **USO ÚNICO**, ou seja, deverá ser descartada após o primeiro uso.

Inspeção:

- Visual: Realize inspeções visuais regulares para verificar a presença de danos, rachaduras, vazamentos e obstruções.
- ❖ **Não tente realizar reparos no equipamento por conta própria.**
- ❖ **Siga rigorosamente as instruções do fabricante.**
- ❖ **Não utilize o produto caso este esteja danificado, descarte-o e substitua por um novo.**

DESCARTE DO PRODUTO

Garantindo a Higiene e Segurança, conforme a RDC vigente, siga as orientações abaixo para o descarte correto deste produto:

Primeiramente, separe o produto de outros tipos de resíduos, especialmente daqueles que podem ser contaminados por agentes biológicos.



- **Embalagem:** Descarte a embalagem do produto em um coletor de lixo reciclável, por se tratar de plástico e papelão.



- **Componentes eletrônicos:** Se o produto contiver componentes eletrônicos, verifique a existência de programas de coleta e reciclagem em sua região.



- **Produto médico:** este produto **NÃO PODE** ser descartado em lixo comum ao final de sua vida útil, devido risco de contaminação por agentes biológicos.

TERMO DE GARANTIA

Adquirindo um produto do Grupo Haoxi, você adquire segurança e confiabilidade. Todos os nossos equipamentos são fabricados com alta qualidade e possuem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, conforme a legislação vigente, a partir da emissão da Nota Fiscal pela Rioxi / Haoxi. E para produtos adquiridos em Revendas, o prazo é de 3 meses a partir da Nota Fiscal emitida pelo Revendedor, mesmo que exceda os 12 meses da primeira Nota Fiscal emitida pela Rioxi / Haoxi ao Revendedor.

O que não está coberto pela garantia:

- Danos causados por acidentes, uso inadequado ou alterações realizadas por pessoas não autorizadas pela Rioxi.
- Produtos sem a apresentação da nota fiscal original.

Como solicitar o serviço de garantia:

Para solicitar o serviço de garantia, entre em contato com a Rioxi ou com um representante autorizado, apresentando a nota fiscal de compra e o número do lote do produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição:

- Modelo da cor branco leitoso, rígido: Policloreto de Vinila (PVC).
- Modelo da cor transparente, flexível: Policloreto de Vinila (PVC) e Polietileno (PE).
- Produto atendendo as Normas:
 - ABNT NBR ISO 14971
 - ABNT NBR ISO 13485
 - ANVISA RDC nº 665/2022

FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

FABRICADO POR:

Rioxi Ind. Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares LTDA

CNPJ: 41.621.496/0001-06 – I.E.: 131.018.686.111 – AFE ANVISA nº: 8.23.535-9

DISTRIBUIDO POR:

Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA

CNPJ: 05.678.146/0001-04 – IE: 116.613.824.117 – AFE ANVISA nº: 8.01.900-1

CONTATO:

Rua Anhembí, 80 – Jardim Caravelas – São Paulo/SP – CEP: 04728-010

Fone: +55 (11) 5642-0587 – www.haoxi.com.br